

ІНСТРУКЦІЯ

Пояс з підігрівом

Y06AF

Підігрів до

60°C



Пояс з підігрівом Y06AF – це еластичний пояс для спини з вбудованим електричним підігрівом, відмінний аксесуар для оздоровлення та захисту від морозу та холоду. Теплова терапія стимулює кровообіг, розслабляє м'язи, знімає набряки, запалення, біль і м'язову втому.

За живлення всієї електроніки в поясі відповідає знімний акумулятор на 6000 мАг.

Головною особливістю моделі є можливість налаштовувати температуру нагріву пояса, не знімаючи його. Робиться це за допомогою кнопки, яка розміщена на самому поясі біля роз'єму живлення. При натисканні на кнопку змінюються режими роботи та інформує про це вбудований світлодіодний індикатор у кнопці. Режимів нагріву у пристрої є 5 і кожен з них відрізняється температурою і відповідно часом автономної роботи від батареї:

- Червоний колір індикатора: нагрів до 60°C (до 3-х годин)
- Зелений колір індикатора: нагрів до 55°C (до 4-х години)
- Блакитний колір індикатора: нагрів до 50°C (до 5 годин)
- Білий колір індикатора: нагрів до 45°C (до 7 годин)
- Жовтий колір індикатора: нагрів до 35°C (до 10 годин)

Коротка інструкція з експлуатації

1. Зарядіть акумулятор за допомогою оригінального зарядного пристрою. Увага! Для заряджання використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій, щоб уникнути нещасних випадків та виходу акумулятора з ладу. Приблизний час повної зарядки – близько 6 годин.
2. Вимкніть акумулятор від зарядного пристрою. Підключіть його за допомогою гнізда до пояса. Використовуйте для живлення нагрівального елемента лише акумулятор, що йде в комплекті.
3. Міцно затягніть та зафіксуйте пояс на спині за допомогою посиленого ремня на липучках.
4. Виберіть потрібний режим нагрівання за допомогою кнопки.
5. Для комфортного використання, сховайте акумулятор у кишеньку.
6. Для припинення нагрівання можна вимкнути акумулятор від роз'єму та підключити знову за потреби.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7649